



Информация за продукта/Указания за употреба

OPTO CLEAN

Описание

OPTO CLEAN е почистващ концентрат за оптика. Той е одобрен концентрат за почистване на стъкла и рамки в ултразвукови вани. Подходящ също за почистване на стъклени стъкла, изработени от пластмасови материали, рамки и други прецизни оптични части.

Предимствата на OPTO CLEAN:

- Q Нежно премахване на мазни и потни отлагания, пръстови отпечатащи
- Q Няма повреди за очила и рамки и след многократно нанасяне
- Q Изсветляване за повечето метални рамки

Приложение и дозировка

- Q Съотношение на разреждане: разреждете с вода около 1:20 - 1:50 (2 - 5 %).
- Q В зависимост от степента на замърсяване, почистете в ултразвукова вана за прикл. 1-10 мин.
- Q Изплакнете почистените парчета в течаща вода и ги подсушете.

Препоръки за безопасност

OPTO CLEAN не е класифициран като опасен съгласно Регламент (ЕО) № 1272/2008 [GHS].
Спазвайте съветите, посочени в информационните листове за безопасност. Винаги боравете внимателно с химикалите.

Физико-химична характеристика

- Q Плътност: 1,02 g/ml • рН в състояние на доставка: 9,5 - 10.
- Q Съставки съгласно Приложение VII, А, Регламент (ЕО) № 648/2004 относно детергентите:
<5 % анионни повърхностноактивни вещества, <5 % нейногенни повърхностноактивни вещества, парфюми.

Изхвърляне

Повърхностноактивните вещества в нашия продукт отговарят на критериите за биоразграждане, посочени в Приложение III на Регламент (ЕО) № 648/2004 относно детергентите.

Използваният почистващ разтвор може да се подава в обществената канализация; спазвайте местните гранични стойности на рН и се уверете, че замърсяването, съдържащо се в използвания почистващ разтвор, отговаря на местните разпоредби за канализацията. Изхвърляне на концентрата: евентуална неутрализация (спазвайте местните разпоредби за канализация).

Европейски код за отпадъци: 20 01 30, „детергенти, различни от посочените в 20 01 29“.

Обеми, съхранение и транспорт

Q Налични обеми: 1 л PE-бутилка 25 l HDPE-REF 5803900000, 5 l HDPE-кан 5804000000, REF 8000201 и кутия 8000027. REF

Q Съхранявайте в затворена оригинална опаковка при температура между +5 °C и +30 °C, защитени от топлина и пряка слънчева радиация.

Q Срок на годност: 5 години от датата на производство (виж партидата на етикета).

Q Класификация за всички транспортни средства: не е опасен материал.

Акcesoари

Q кран (изходен кран): за 5 / 10 l кутии 800003927 • за 25 l кутии Q Дозираща чаша: 250 ml обем/5 ml мащаб 8000643 • 1000 ml обем/10 ml мащаб REF 800003928. REF 8000647.